

## HEMOCATH® KIT

### Slutet system med hydrofil tappningskateter och urinpåse

Klass: Class IIa  
Certifiering: ISO 13485-2003, ISO 9001-2000, CE 93/42/EEC

#### KARAKTERISTIK

Slutet system med hydrofil tappningskateter, vatten dospåse samt urinpåse färdig att använda. Konstruerad för att användas i de fall användaren inte kan hitta rent vatten och/eller en toalett. Homecath® kateter är en urindräneringskateter för engångsbruk tillverkad av PVC (polyvinylklorid) och täckt med tvärbunden PVP (Polyvinylpyrrolidon) för överlägsen smörjd intermittent kateterisation. Ytskiktet på Homecath® katetrar har en hydrofil beläggning som binder vatten. Resultatet är en mycket blöt och hal yta som har 90-95% lägre friktion än traditionella katetrar med gel. Den hydrofila ytan innebär att katetern har låg friktion när den införes.

Kateterkonan har en internationell färgkod enligt följande:

CH	06	08	10	12	14	16	18
Färg	Ljusgrön	Blå	Svart	Vit	Mörkgrön	Orange	Röd

#### SORTIMENT (Per kön och ålder)

Män: 40 cm CH 08-10-12-14-16-18.

Kvinnor: 20 cm CH 12-14-16-18.

Barn: Pediatriska 20 cm CH 06-8-10 & Pediatriska 30 cm CH 06-8-10.

(CH: Charriere 1mm=3CH)

#### INDIKATIONER

- Tömning av urinblåsan, särskilt utanför hemmet som på jobbet, i skolan etc.
- Intermittent kateterisering

#### STERILISATION

Steriliserad med Gammastrålning

För engångsbruk

#### ANVISNING FÖR ANVÄNDNING

- Händerna ska tvättas innan kateterisering.

- Öppna förpackningen genom att dra i flikarna på anslutningsidan.
- Bryt vattenpåsen genom att böja och pressa på den eller genom att klämma på den övre delen. Låt sedan vattnet strömma in i paketet.
- Paket kan fästas på en torr yta med hjälp av tejp på förpackningen.
- Katetern bör dränkas i vatten under minst 30 sekunder för att bli smörjd inför kateteriseringen.
- Vänd påsen upp och ned och riv av urinpåsens svans vid skåran mellan de små vingarna.
- För ut katetern ur påsen och kateterisera. Genom att hålla i katetern genom svansen i påsen behöver katetern inte direkt vidröras med händerna.
- När urinflödet upphör, dras katetern ut samt pressas tillbaka in i påsen. Gör en knut på svansen.
- Kassera påsen med dess innehåll. Du kan även tömma den genom att riva upp den vid skåran mellan vingarna på urinpåsen, och sedan kasta den.

### **MATERIAL**

Kateterkroppen	Medicinsk kvalitet (Medical Grade) PVC
Konan	Medicinsk kvalitet (Medical Grade) PVC
Ytbeläggning	PVP K90
Vattenpåse	Steril rent vatten förpackat i en aluminiumpåse
Urinpåse	Transparent PVC-film
Förpackningar	Medicinska förpackningar av papper som lämpar sig för EO sterilisering
Kartong	Kartong

### **VARNINGAR**

Katetern kräver inte tillsats av vatten från utsidan. Anordning endast för engångsbruk och kan inte återanvändas steriliserad. Måste kasseras efter användning. Använd inte om förpackningen är öppen eller har skadats.

### **FÖRVARING**

Förvara i rumstemperatur (15-25 ° C). Förvaras på en ren och torr plats åtskilt från värme och ljus. Hållbarhet 5 (fem) år från steriliseringsdatum.

### **AVDELNINGSFÖRPACKNING**

Innehåller 20 stycken

<b>Art nr</b>	<b>Produktnamn</b>
HKP-2008	Hydrofil tappningskateter set med urinpåse CH 08, längd 20 cm
HKF-2010	Hydrofil tappningskateter set med urinpåse CH 10, längd 20 cm
HKF-2012	Hydrofil tappningskateter set med urinpåse CH 12, längd 20 cm
HKF-2014	Hydrofil tappningskateter set med urinpåse CH 14, längd 20 cm
HKM-4008	Hydrofil tappningskateter set med urinpåse CH 08, längd 40 cm
HKM-4010	Hydrofil tappningskateter set med urinpåse CH 10, längd 40 cm
HKM-4012	Hydrofil tappningskateter set med urinpåse CH 12, längd 40 cm
HKM-4014	Hydrofil tappningskateter set med urinpåse CH 14, längd 40 cm
HKM-4016	Hydrofil tappningskateter set med urinpåse CH 16, längd 40 cm