

Inpassning av PerforMax

lätt som en plätt

Val av storlek och inpassning av PerforMax går snabbt och intuitivt.

PerforMax finns i två storlekar:

- Liten för mycket små och smala ansikten
- Stor som passar de flesta ansikten

Inpassning av PerforMax sker i tre enkla steg som framgår av bilderna.



Placering av maskhållare



Fäst och justera maskhållaren



Anslut mask och ventilator

PerforMax ventilatorkompatibilitet

PerforMax är kompatibel med intensivvårdsventilatorer med dubbelslangsystem eller med dedikerade NIV-plattformar, med enkelslangsystem.

Det löstagbara knäröret ger flexibel användning.

Det genomskinliga knäröret med antiasfyxiventil möjliggör användning med BiPAP Vision och Focus.



Beställningsinformation

Art.nr.	Produktbeskrivning	Storlek	Antal/fp
1044386	PerforMax Flergångs L, EE & SE	L	1 mask & 1 maskhållare
1044385	PerforMax Flergångs S, EE & SE	S	1 mask & 1 maskhållare
1052569	PerforMax Flergångs L, SE	L	1 mask & 5 maskhållare
1052568	PerforMax Flergångs S, SE	S	1 mask & 5 maskhållare
1052554	PerforMax Flergångs L, EE & SE	L	1 mask & 5 maskhållare
1052553	PerforMax Flergångs S, EE & SE	S	1 mask & 5 maskhållare
1051816	PerforMax maskhållare	L	5
1051857	PerforMax maskhållare	S	5
1045314	PerforMax maskhållare	L	9
1045325	PerforMax maskhållare	S	9
1045313	Knärör med antiasfyxiventil (Entrainment Elbow, EE) utbytesset	–	1
1043210	Standardknärör (Standard Elbow, SE) utbytesset	–	1

PerforMax kan återanvändas i 10 cykler, och är godkänd för termisk och kemisk desinfektion och rengöring.

Specifikationer

Tryckfall cmH ₂ O (hPa) – Slutet mot atmosfär Öppet mot atmosfär	0,4 cm H ₂ O @ 50 SLPM; 0,9 cm H ₂ O vid 100 SLPM 0,9 cm H ₂ O @ 50 SLPM; 3,3 cm H ₂ O vid 100 SLPM
Ungefärlig dödvolum*	550 ml (vuxna); 350 ml (små vuxna)
Förvaringsförhållanden	-20° till 60°C 15 % till 95 % RH, ej kondenserande
Driftsförhållanden	+5° till 40°C 15 % till 95 % RH, ej kondenserande

RESPIRONICS®

Envisioning tomorrow. Improving today.

Respironics, Inc.: +1-724-387-4000

Respironics Europa, Afrika, Mellanöstern: +33-1-47-52-30-00

Respironics Tyskland: +49-81-52-930-60

Respironics Frankrike: +33-2-51-89-36-00

Respironics Italien: +39-03-62-63-43-1

Respironics Schweiz: +41-62-745-1750

Respironics UK: +44-800-1300-845

Respironics Asien-Stilla havet: +852-3194-2280

Respironics Australien: +61-2-9666-4444

WWW.RESPIRONICS.EU

Specifikationerna kan komma att ändras utan varsel. OBS! Federala lagar i USA begränsar försäljning av denna produkt till läkare eller på läkarordination.

Respironics, PerforMax, BiPAP, Vision och Focus är varumärken som tillhör Respironics, Inc. och dess dotterbolag.

Alla rättigheter förbehållna. © 2008 Respironics, Inc. RIT HOSP 021 SW bdc9900 04/08



**PERFORMAX IVA TOTALMASK
LÄTT ATT TA PÅ. LÄTT ATT ANVÄNDA.
FÖRDELARNA ÄR TYDLIGA OCH ENKLA.**

PerforMax IVA Mask



Förbättrad patienttolerans av NIV



Intensivvårdsventilator med dubbelslangsystem och NIV-modul

PerforMax IVA totalmask. Lätt att ta på, lätt att använda,

ger ökad patient NIV-tolerans och optimal ventilationseffektivitet

PerforMax är utvecklad med en innovativ och unik teknik för att ta hand om akuta patienter i starkt kritiska situationer.

- förbättrad patient-ventilatorsynkronisering
- otraumatisk tätning
- intuitiv och snabb anpassning i nödsituationer och vid akut användning
- en storlek passar de flesta


Förbättrad ventilationseffektivitet

PerforMax har visat sig:

- ge ett mycket fysiologiskt flödesmönster, vilket framgår av diagram 1
- förbättra synkroniseringen mellan patientens in- och utandningsfaser och ventilatorns reaktioner, vilket framgår av diagram 2 och 3.
- minimera andningsansträngningen för patienten

Patient-ventilatorsynkronisering

Vid användning av noninvasiv ventilation på akuta patienter spelar masken en avgörande roll för att få perfekt synkronisering mellan patienten och ventilatorn. Så snart patienten gör en ansats att andas in ska ventilatorn snabbt tillföra luft. Så snart patienten börjar andas ut ska ventilatorn sluta tillföra luft.

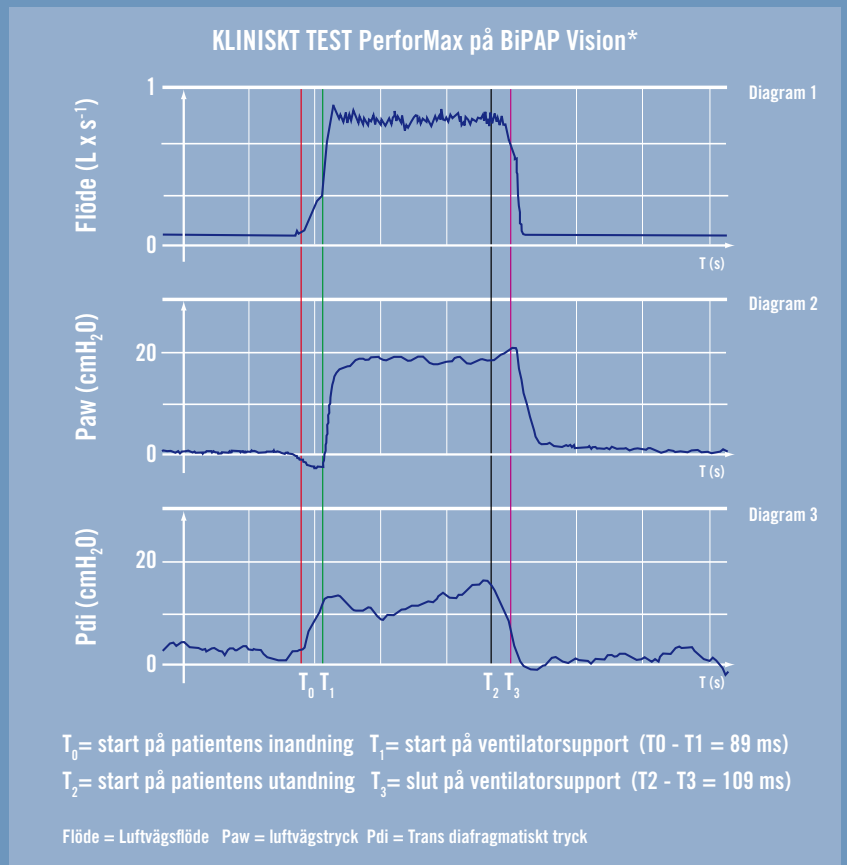

* data på fil

Fördelar med PerforMax

Stor silikonkudde fördelar trycket jämnt över pannan och plana områden i ansiktet för att ge förbättrad förslutning, ökad ytkontakt och bekvämlighet.



Den förformade maskhållaren underlättar placeringen på patientens huvud.



Snabbkopplingar för snabb borttagning av masken. Så snart patienten har passats in kan banden tas loss och sättas tillbaka upprepade gånger utan förnyad justering, snabbt och enkelt.

Tryckport i knäröret för proximal tryckslang eller övervakningsutrustning.



Obehindrad bred vinkelsyn minskar patientens klaustrofobikänsla.

En unik form som passar mot ansiktets konturer och undviker tryck på näsryggen.

Standardknärör för dubbelslangsystem.