

Hans Rudolph, 7700 series V2mask, Flergångs

Helmask för Bilevelutrusning med AAV (antiasfyxiventil) och utan lufthål

Med storlekarna Large, Medium, Small, Extra Small, Petite

Produktegenskaper

- Med 5 storlekar för att passa de flesta patienter.
- Maskdelen har en ny tätningsfläns runt ansiktet och är i ett enda stycke, masken är tillverkad i ett klart mjukt silikongummi.
- Anatomiskt utformad maskkudde med ett inbyggt hakstöd samt med ett räfflat stöd för en läckagefri och komfortabel passform.
- Antiasfyxiventil (AAV) för ökad patientsäkerhet - patienten kan andas rumsluft om luftflödet från enheten inte fungerar. Ventilen öppnar vid masktryck mindre än 3cm H₂O.
- Dubbel 360° svivelport med 22 mm i innerdiameter ger en förbättrad patientsäkerhet och rörelsefrihet och har en genomskinlig gul färgkod.
- Maskhållaren har 4 remmar och är lätt att justera samt har låg vikt. Detta ger en ökad patient komfort och finns i tre storlekar.
- Bekvämt **"Quick-release"** med låsclips för snabb och enkel montering & demontering av maskhållaren.
- Hög kvalitet på mask & maskhållare som är lätta och enkla att använda.
- Utvärderad för höggradig kall-kem desinfektion, ångautoklavering eller diskmaskin. Användning av tåliga material i tillverkningen av V2mask™ gör att den har lång livslängd. **Detta är en flerpatients, flergångsmask.** Maskkudden och svivelporten kan som en enhet klara många ångsteriliseringar.




SPECIFIKATIONER

Material (se fig. A)	
Ansiktsmask med förstärkande delar	Silikongummi, polykarbonat termoplast
Svivel port - masktillpassare, knärör, 22 mm port	Polykarbonat termoplast, genomskinlig gul
Svivelport - Antiasfyxiventil (AAV)	Polykarbonat genomskinlig termoplastisk
Membran	Silikongummi
Maskhållare	Polyuretanskum, nylon UBL och elastiskt material, svart
Maskhållarhake	Nylon, svart
Maskhållarspänne (4 st)	Polypropylen, svart

ALLMÄN INFORMATION


- **Användningsområde:** 7700 serie V2mask™ är en flergångs, multi-patient, vuxen oro-nasal Bilevel mask utan en passiv, kontinuerlig utandningsventil inbyggd i masken. Den är avsedd för användning med vissa Bilevel maskiner för behandling av obstruktiv sömnapné, och för användning med andra liknande ventilatorer som använder denna utandningskonfiguration som omfattar patientens ventilation i patientkretsen istället för i masken och tillhandahålla ett minimum av 3 cm H₂O tryck som uppmäts vid masken.
- **Indikationer för användning:** V2mask™ är avsedda att användas på vuxna patienter (mer än 30 kg vikt) för behandling av obstruktiv sömnapné eller andra indikationer som kräver Bilevel eller icke-invasiv andningsstöd vid tryck högre än eller lika med 3,0 cm H₂O vid masken i hemmet, sjukhus och andra kliniska situationer.
- **Användningsområde:** V2mask™ är avsedd för användning i hemmet, sjukhus och andra kliniska inrättningar för personer som har tillräckliga instruktioner eller utbildning om användningen av masken, liksom den enhet som masken är avsedd att anslutas till.
- **Försiktighetsåtgärder:**
 - A.) Denna produkt endast säljas av eller användas på order av en läkare.
 - B.) Vid låga tryck från Bilevel kan flödet genom patienten kretsen vara otillräcklig för att ta bort all utandningsgas från slangen. En viss återinandning kan förekomma.
 - C.) Patienter med ansiktshår, speciellt skägg, kan uppleva maskläckage något som kan kräva att man måste raka bort håret.
- **Varning:** Se: bruksanvisning, dokument nr 691271, som levereras med produkten.
- **Kontraindikationer och komplikationer:** Se: bruksanvisning, dokument nr 691271, som levereras med produkten.

Oro-Nasal BiLevel V2 Mask™ with Headgear

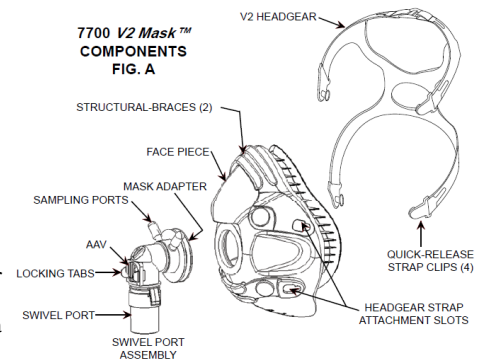

FYSISKA DATA

Maskens dimensioner

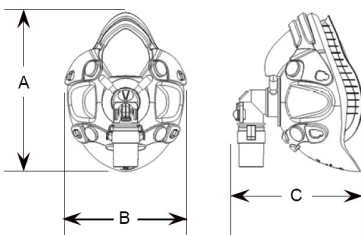

Maskens dödvolum (ml)				
Large	Medium	Small	Extra Small	Petite
170	152	126	115	105

	Mask storlek med dimensionerna - inches (mm)				
	LARGE	MEDIUM	SMALL	EXTRA SMALL	PETITE
A	5.9 (150)	5.5 (140)	5.2 (132)	4.8 (122)	4.6 (117)
B	4.2 (107)	4.16 (105)	4.05 (103)	3.95 (100)	3.9 (99)
C	4.7 (119)	4.46 (113)	4.32 (110)	4.2 (107)	4.04 (103)

MASK SIZING GAUGE

For Hans Rudolph, Inc. Oro-Nasal V2mask™ and V2mask™ Series Face Masks

Directions: Length measurements are used to determine the size of the Hans Rudolph Oro-Nasal mask that will best fit the patient. To measure the patient's facial width, place the gauge to measure and use closed. Place the gauge up to the deepest point of the nasoorbital depression (bridge) and note the size indicated at the bottom tip of the chin. This lower band will fit the nose bridge. This gauge is intended to aid in fitting and not an exact measurement as other factors may need to be taken into account.

"If between sizes, we recommend you use the smaller size."

PETITE
EXTRA-SMALL
SMALL
MEDIUM
LARGE

HANS RUDOLPH, Inc.
MEMBER OF RESPIRATORY VALUES SINCE 1918
ISO 9001 ISO 13485
Tel: (313) 422-7700 USA & CANADA (300) 456-0919
Fax: (313) 422-7700 Email: hro@hansrudolph.com
www.hansrudolph.com
HANS RUDOLPH, Inc. 4015 G&P Drive, Overland Park, KS 66207 USA


BESTÄLLNINGSGENOMGÅNGS INFORMATION - 7700 Series flergångs V2 Oro-Nasal Mask, ej ventilerat knärör men med AAV (antiasfyxiventil) och 22mm anslutning, innerdiameter (ID) för Bilevelutrusning inklusive maskhållare



	Mask, AAV, icke ventilerad 22 mm ID knärör med maskhållare
113500	7500 Large
113501	7500 Medium
113502	7500 Small
113503	7500 Extra Small
113504	7500 Petite
	Mask, AAV, icke ventilerad 22 mm ID knärör med en mindre maskhållare
113585	7500 Large
113586	7500 Medium
113587	7500 Small
113588	7500 Extra Small
113589	7500 Petite



	Utbytbara delar
669180	Ansiktsmask Large
669181	Ansiktsmask Medium
669182	Ansiktsmask Small
669183	Ansiktsmask Extra Small
669184	Ansiktsmask Petite
201494	Maskhållare Large
201493	Maskhållare Medium
201492	Maskhållare Small
201528	Knärör med svivelport, AAV, icke ventilerad, 22 mm ID
201555	Huvudbands clips i paket om fyra
201521	AAV port monteringskitt
211022	Plugg för samplingsport/ 2-pack

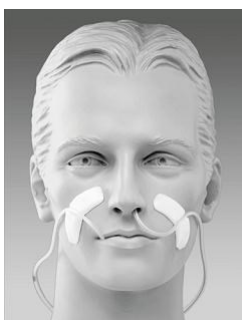

	Tillbehör
691143	Mask Sizing Gauge för V2 Oro-Nasal mask
669353/5	Metroseal, sond/katetertätning, engångs, 5 pack

